

medi

medi

弾性スリーブカタログ

2024/7/1～




medi. I feel better.

# メディ・ジャパンについて

医療分野を中心に、長い経験と実績をもつメディ社 (medi GmbH & Co.KG) は本社をドイツ・パイロイトに構え、世界中に製品を輸出しています。

ここ日本では、メディ・ジャパンが、mediブランドの弾性ストッキングをはじめ、装具、スポーツ製品、ファッション製品などを輸入・販売しております。

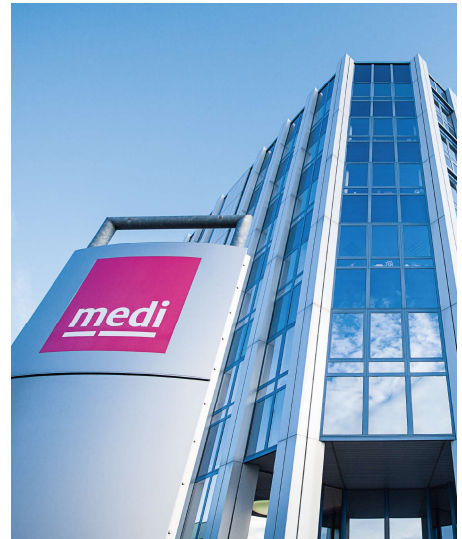

## medi 弾性スリーブのアウトライン

メディ弾性スリーブの特徴は、なんといってもこだわりの品質、そして種類の豊富さにあります。既製品として丸編み・平編みの両方を展開しているほか、常に、新しい技術を積極的に取り入れた心地よい製品作りを心がけています。

	メディ ハーモニー	メディ エスプリ
編み方	丸編み (手袋・ミトンは平編み)	平編み
圧迫クラス	1, 2	1, 2
スタイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・刈ア</li> <li>・ミトン付刈ア</li> <li>・ミト</li> <li>・手袋</li> <li>・刈ア SC&amp;B付</li> <li>・ミトン付刈ア SC&amp;B付</li> <li>・刈ア TB付</li> <li>・ミトン付刈ア TB付</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・刈ア</li> <li>・ミトン付刈ア</li> <li>・手袋</li> <li>・刈ア TB付</li> <li>・ミトン付刈ア TB付</li> </ul>
サイズ	・SS ~ 4L	・3S ~ LL
ワイドタイプ	・有	・無
カラー	ブラック サンド キャラメル	キャラメル

\* TB = トップバンド SC & B = ショルダーキャップ&ベルト  
\* 一部のスタイルでサイズ展開の異なるものがあります。

繊維混用率 (%表示)	メディハーモニー スリーブ 手袋・ミトン				メディ エスプリ	
圧迫クラス	1	2	1	2	1	2
ナイロン	66	57	82	78	88	84
ポリウレタン	34	43	18	22	12	16

1 : 18~21 mmHg 2 : 23~32mmHg

### medi 弾性スリーブのお手入れ方法

- ・装着後は、毎回洗濯してください。
- ・液温は40℃を限度とし、洗濯機でデリケートモード等、弱い洗濯が可能です。洗濯ネットを使用してください。
- ・塩素系及び酸素系漂白剤は使用しないでください。
- ・柔軟剤は使用しないでください。
- ・日陰の風通しのよい場所で乾燥させてください。
- ・ドライクリーニングは行わないでください。
- ・低い温度でのタンブル乾燥は可能です。(排気温度上限60℃)
- ・アイロン仕上げは行わないでください。

## こんなにもある medi 弾性スリーブの特徴

### アイコン



#### テキスタイルへの信頼性

このマークのある製品は、低アレルギー性で、ラテックスフリーであることが、外部の試験機関によって実証されたものとなります。



#### Latex free

全てのmedi弾性スリーブはラテックスフリーです。



#### Clima Comfort

発汗を抑え、そしてお肌を乾燥から守ります。これはスムーズな湿気の放出を可能にする特殊な編み立て技術によって、成し遂げられます。この機能は付加的に、スリーブの内側の温度調整としても作用します。



Variety

#### Variety

2種類の圧迫力、豊富なスタイルサイズ展開で、様々なニーズにお応えするのが、medi弾性スリーブです。



Perfect Fit

#### Perfect Fit

患者様が快適に過ごせるよう、経験と実績に基づき、通気性、伸縮性、必要な圧迫力といった重要な要素が、うまく調和されるようデザインされた製品です。



Double ellipses  
メディハーモニーのみ

#### Double ellipses

肘の外側と内側の2箇所に、楕円形状の加工を施しています。これによって、肘周囲のしわの形成と屈伸動作で生じる肘の負担が軽減されます。



# メディハーモニー

販売名 : メディ弾性ストッキング  
届出番号 : 13B3X1028500001

- ・ラノリンが含まれた、お肌に優しい素材です。また、素材の伸縮性が高いため、丈の許容値が広く設定されています。
- ・一部の製品にはショート丈をご用意しているほか、上腕部周径が大きい方むけに、ワイドタイプも展開しています。

①スタイル	スリーブ	ミトン付スリーブ	ミトン	手袋 (指加圧タイプ)	スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付	
 <p>全て1箱1枚入りの価格です。</p>						
<b>圧迫クラス1</b> 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	スタANDARD丈 税抜き価格 税込み価格	2Y00 ¥9,300 ¥10,230	2Y10 ¥14,900 ¥16,390	2Y90 ¥9,300 ¥10,230	2Y91 ¥18,700 ¥20,570	2Y05 ¥12,800 ¥14,080
<b>圧迫クラス2</b> 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	スタANDARD丈 税抜き価格 税込み価格	2Z00 ¥9,700 ¥10,670	2Z10 ¥15,400 ¥16,940	2Z90 ¥9,300 ¥10,230	2Z91 ¥19,800 ¥21,780	2Z05 ¥13,300 ¥14,630

手袋・ミトンにつきましては、仕様変更によりシームレスデザインに切り替わっています。シームレスデザインの特徴は、次のページをご参照ください。

①スタイル	ミトン付スリーブ ショルダーキャップ & ベルト付	①スタイル	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付	
 <p>全て1箱1枚入りの価格です。</p>		 <p>全て1箱1枚入りの価格です。 ショート丈はキャラメル色のみ展開です。</p>			
<b>圧迫クラス1</b> 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	スタANDARD丈 税抜き価格 税込み価格	<b>圧迫クラス1</b> 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	ショート丈 スタANDARD丈 税抜き価格 税込み価格	2Y31 2Y01 ¥11,600 ¥12,760	2Y41 2Y11 ¥18,000 ¥19,800
<b>圧迫クラス2</b> 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	スタANDARD丈 税抜き価格 税込み価格	<b>圧迫クラス2</b> 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	ショート丈 スタANDARD丈 税抜き価格 税込み価格	2Z31 2Z01 ¥12,100 ¥13,310	2Z41 2Z11 ¥18,700 ¥20,570

\*スリーブ各種について(手袋・ミトンを除く)

上腕部が幅広に設計されたワイドタイプをお選びいただけます。スタANDARD・ワイドタイプそれぞれの周径許容値を、採寸表でご確認のうえ、お選びください。(どちらも料金は同じです)

●カラー、上腕部ワイドタイプの要否、サイズをお選びください。・ピンクで色付けされているものはお取り寄せ対象となります。

②カラーをお選びください	③上腕部ワイドタイプの要否	④サイズをお選びください
スタANDARD丈： 右上からお選びください	スタANDARD <b>ワイドタイプ</b> 番号：0            番号：1	番号    1    2    3    4    5    6    7 サイズ SS    S    M    L    LL    3L    4L SS    S    M    L    LL S    M    L    LL    3L    4L
ショート丈：キャラメル色のみ 手袋・ミトン：右上からお選びください	番号：0            番号：1 番号：0	

手袋・ミトンにワイドタイプはございません。

## カラー

常時在庫



キャラメル  
(7)



サンド  
(8)

ショート丈はキャラメル色のみの展開です。

取り寄せ



ブラック  
(5)

生地の厚み 圧迫クラス

ミドル CCL 1,2

主な特徴



Clima Comfort



Variety




Perfect Fit




Double ellipses



肘の屈伸動作による負荷としわの形成を防止するために、外側と内側に楕円形上の加工を施しています。

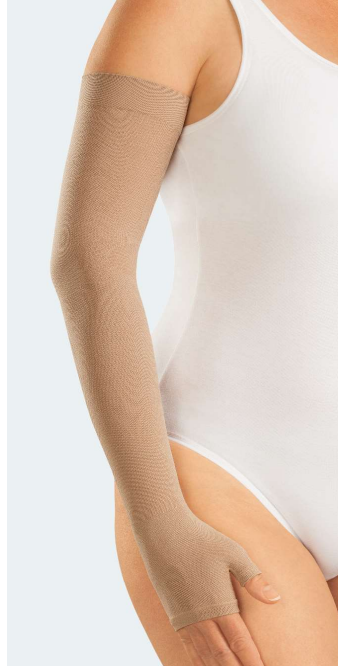

ミトン付スリーブ・サンド色

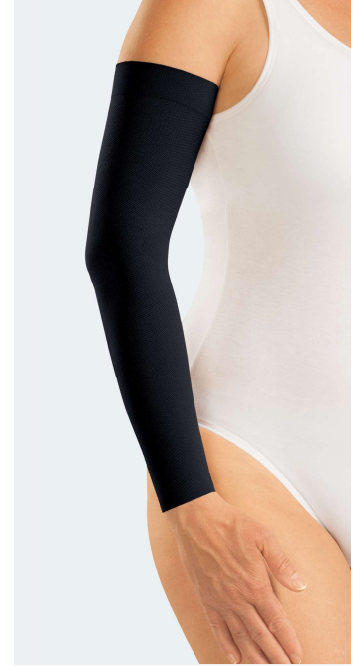

スリーブ・ブラック色

## 手袋・ミトンのシームレスデザインについて

### 指のボーダー部はシームレスに（手袋）

指先の繊細な動きを妨げないよう、ボーダー部にシームレスデザインを採用しました。

また、局所的な食い込み・過度な圧迫の防止を図ります。

### 指間部もシームレスデザインに（手袋）

シームレスデザインの採用で、指間部のフィット感が向上し、指の自由な動きや快適さが増します。

### 母指付け根部もシームレスに

母指付け根部は特に大きな利点です。母指が不自由なく動かせることは人が物をつかむ動作にとって重要です。

母指のシームレスは、手の形にフィットし、生地どうしの摩擦をおさえ指の自由な動きを確保します。

### ボーダー部はより柔らかく

従来よりボーダー部を柔らかくして局所的な食い込み・過度な圧迫の防止に、一層の向上を図ります。



# メディエスプリ

販売名 : メディ弾性ストッキング  
届出番号 : 13B3X10285000001

生地の厚み 圧迫クラス

厚手 CCL 1,2

主な特徴



Climate Comfort



Variety



Perfect Fit

カラー

常時在庫

キャラメル  
(7)

- ・食い込みにくい平編みを既製品でご用意いたしました。  
丈夫でしっかりと圧をかける製品です。
- ・スリーブ各種に2種類の丈をご用意しているほか、周径の細い方もお選びいただきやすいよう、サイズは3Sから展開しております。

・ピンクで色付けされているものはお取り寄せ対象となります。


①スタイル	スリーブ	スリーブ トップバンド付	ミトン付 スリーブ	ミトン付スリーブ トップバンド付	手袋 (指加圧タイプ)	
全て1箱1枚入りの価格です。						
圧迫クラス1 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	ショート丈	J1H0	J1H1	J150	J151	J110
	ロング丈	J1G0	J1G1	J160	J161	
	税抜き価格	¥17,400	¥17,400	¥23,300	¥23,300	
税込み価格	¥19,140	¥19,140	¥25,630	¥25,630	¥23,100	
圧迫クラス2 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	ショート丈	J2H0	J2H1	J250	J251	J210
	ロング丈	J2G0	J2G1	J260	J261	
	税抜き価格	¥17,400	¥17,400	¥23,300	¥23,300	
税込み価格	¥19,140	¥19,140	¥25,630	¥25,630	¥23,100	



スリーブ トップバンド付



スリーブと手袋の併用

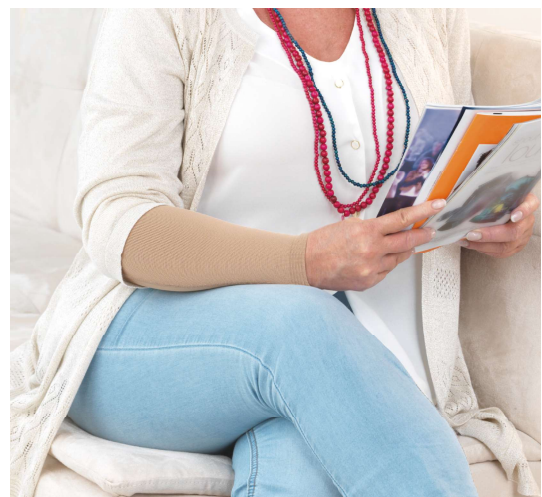

スリーブ

●タイプ、サイズをお選びください。

・ピンクで色付けされているものはお取り寄せ対象となります。

②カラー	③タイプ	④サイズをお選びください
キャラメル色のみ 番号：7	スリーブ各種 番号：0	番号 1 2 3 4 5 6 サイズ 3S SS S M L LL
	手袋 番号：1	サイズ番号にご注意ください。(例：3Sが1となります)




# 採寸表

製品は、ご自身の①周径の採寸と②丈（長さ）を採寸いただき、お選びください。  
また、スリーブ各種と手袋・ミトンは採寸箇所が異なりますので、ご注意ください。

## スリーブ各種の採寸表

### ①周径の採寸

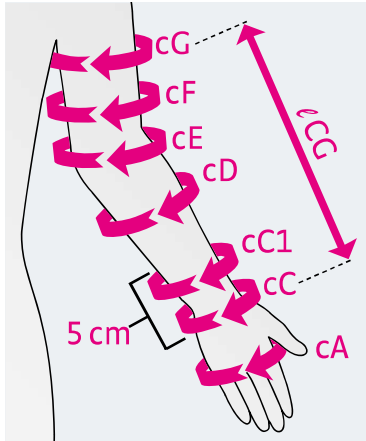

- cG 上腕周：腋の下の周径
- cF cEとcGの中間位周径
- cE 肘周：肘を軽く曲げた時の周径
- cD 前腕の最も太い部位の周径
- cC1 cCより約5 cm近位の周径
- cC 手首周：最も細い部位の周径
- cA 親指以外の4指の付け根の周径

### メディハーモニー

スリーブ各種 周径 (cm)	SS (I)		S (II)		M (III)		L (IV)	
	スタンダード	ワイド	スタンダード	ワイド	スタンダード	ワイド	スタンダード	ワイド
cG	25,5-28,0	28,5-31,0	28,0-30,5	30,5-33,5	30,0-33,0	33,0-36,0	32,0-35,0	35,0-38,5
cF	23,5-25,5	25,5-28,0	25,0-27,5	27,5-30,0	27,5-30,0	30,0-33,0	29,5-32,0	32,0-35,0
cE	23,0-25,0	24,0-26,0	24,5-26,5	26,5-29,0	26,0-28,5	28,5-31,0	27,5-30,0	30,0-33,0
cD	22,0-24,0	24,0-26,0	23,0-25,0	25,0-27,5	24,0-26,0	26,0-28,5	25,0-27,5	28,0-30,5
cC1	15,0-16,5		16,5-18,0		18,0-19,5		19,5-21,0	
cC	13,5-14,5		14,5-15,5		16,0-17,5		17,5-19,0	
cA	15,0-18,0		16,0-19,0		17,0-20,0		19,0-22,0	

周径 (cm)	LL (V)		3L (VI)		4L (VII)	
	スタンダード	ワイド	スタンダード	ワイド	スタンダード	ワイド
cG	33,5-36,5	37,0-40,5	36,0-39,5	39,5-43,0	38,0-41,5	41,5-45,5
cF	31,0-34,0	34,0-37,0	33,0-36,0	36,0-39,5	35,0-38,5	38,5-42,0
cE	29,0-31,5	31,5-34,5	30,5-33,5	33,5-36,5	32,5-35,5	35,5-39,0
cD	27,0-29,5	29,5-32,0	28,5-31,0	31,0-34,0	30,5-33,5	33,5-36,5
cC1	21,0-23,0		23,0-25,0		25,0-27,5	
cC	19,0-20,5		20,5-22,5		22,5-24,5	
cA	20,0-23,0		22,0-25,0		24,0-27,0	

### メディエスプリ

スリーブ各種 周径 (cm)	3S	SS	S	M	L	LL
cG	26,0-30,0	28,0-32,0	30,0-34,0	32,0-37,0	35,0-40,0	38,0-44,0
cE	23,0-25,5	25,0-27,5	27,0-29,5	29,0-32,0	31,0-34,0	33,0-37,0
cC	13,0-15,0	15,0-17,0	17,0-19,0	19,0-21,0	21,0-23,0	23,0-25,0
cA	15,0-18,0	17,0-19,0	18,0-20,0	19,0-22,0	21,0-24,0	23,0-27,0

### ②丈の採寸

#### メディハーモニー

丈 (cm)	ショート丈	スタンダード丈
CG	36-40	41-47


#### メディエスプリ

丈 (cm)	ショート丈	ロング丈
CG	40-44	44-48



# 手袋・ミトンの採寸表

## ①周径の採寸

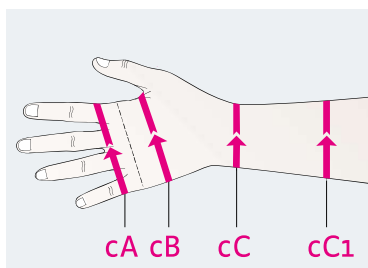

### メディハーモニー


#### 周径 (cm)

サイズ	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)	3L (VI)	4L (VII)
cC1	15,0-18,0	17,0-20,0	19,0-21,5	21,0-23,5	23,0-26,0	25,5-30,0
cC	13,5-15,5	15,0-18,0	17,0-20,0	19,0-21,0	20,0-23,5	22,5-27,5
cB	15,5-20,0	17,5-21,0	19,5-23,0	20,5-24,0	22,5-26,0	24,5-30,0
cA	15,0-19,0	17,0-20,0	19,0-22,0	20,0-23,0	22,0-25,0	24,0-29,0

#### 周径 (cm)

cC1	cCより約5 cm近位の周径
cC	手首周：最も細い部位の周径
cB	手背周：手掌中央部の周径
cA	親指以外の4指の付け根の周径

サイズ	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)	3L (VI)	4L (VII)	
親指	cX	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0
	cZ	6,0	6,5	6,5	7,0	7,5	8,0
人差し指	cX	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	cZ	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
中指	cX	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	cZ	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
薬指	cX	6,0	6,5	7,0	7,0	7,5	9,0
	cZ	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,5
小指	cX	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0	8,0
	cZ	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	6,0

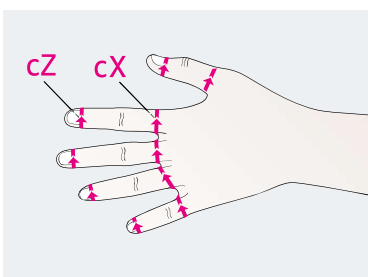

cZ	爪床部の周径
cX	指の付け根の周径

### メディエスプリ

#### 周径 (cm)


サイズ	3S	SS	S	M	L	LL
cC1	13.5-16.0	15.5-18.0	17.5-20.0	19.5-22.0	21.5-24.0	23.5-26.0
cC	13.0-15.0	15.0-17.0	17.0-19.0	19.0-21.0	21.0-23.0	23.0-25.0
cB	16.0-19.0	18.0-21.0	20.0-23.0	22.0-25.0	24.0-27.0	26.0-29.0
cA	15.0-18.0	17.0-20.0	19.0-22.0	21.0-24.0	23.0-26.0	25.0-28.0

#### 周径 (cm)

サイズ	3S	SS	S	M	L	LL	
親指	cX	6.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5
	cZ	4.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
人差し指	cX	5.0	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
	cZ	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
中指	cX	5.0	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
	cZ	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
薬指	cX	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
	cZ	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
小指	cX	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
	cZ	3.0	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5

指の周径は、基準値より大きくはずれていないかの目安として、ご参照ください。

## ②丈の採寸

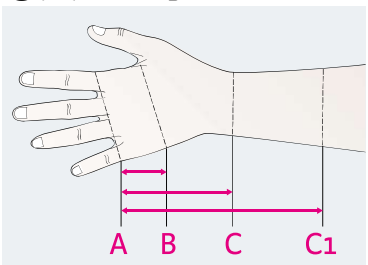

### メディハーモニー

丈 (cm)	全サイズ共通
AB	3,5-4,5
AC	10,0-12,0
AC <sub>1</sub>	15,0-16,0

丈 (cm)	全サイズ共通
親指	3,5-4,5
人差し指	4,5-5,5
中指	5,5-6,5
薬指	4,5-5,5
小指	3,5-4,5

\*XZの丈を採寸します

### メディエスプリ

丈 (cm)	3S-S	M-LL
AB	3.5	4.0
AC	9.5	10.0
AC <sub>1</sub>	14.0	15.0

丈 (cm)	3S-SS	S-L	LL
親指	3.5	4.0	4.5
人差し指	4.5	5.0	5.5
中指	5.5	6.0	6.5
薬指	4.5	5.0	5.5
小指	3.5	4.0	4.5

\*XZの丈を採寸します

指の丈は、基準値より大きくはずれていないかの目安として、ご参照ください。

# medi弾性スリーブ着用の サポートツール カスタマーサービス

## より負担なく弾性スリーブ を着脱できるように

弾性スリーブをご使用の方にとって、その着脱は、ほとんど毎日行うとても大変な作業と思われる。メディでは、そういった日々の着脱作業の負担が少しでも軽減されるよう、様々な補助具をご用意しています。

### アームバトラー



スリーブ用の装着補助具です。右写真のように、バトラーの先端を机にひっかけて使用します。



品番 6900057

税抜き価格 ¥17,400  
税込み価格 ¥19,140

### エクスポートロングハンドル

メディバトラーのなかで、お求めやすい価格の製品です。ストッキングとスリーブのどちらの着脱にもご使用いただけます。



品番 6900041

税抜き価格 ¥8,900  
税込み価格 ¥9,790

### メディラバークグローブ

スリーブを装着する時引き上げを容易にするとともに、爪でスリーブが損傷してしまうことを防止できます。



品番 丈 (cm) サイズ

6904022	7.0	S
6904023	7.5	M
6904024	8.0	L

税抜き価格 ¥1,200  
税込み価格 ¥1,320

### メディテキスタイルグローブ

グリップカの強化、爪によるスリーブの損傷を防止します。本品の一部にポリエステル生地が使用され、通気性を高めています。




品番 丈 (cm) サイズ

6903022	7.0	S
6903023	7.5	M
6903024	8.0	L

税抜き価格 ¥1,200  
税込み価格 ¥1,320

#### ■採寸箇所

メディテキスタイルグローブ  
メディラバークグローブ

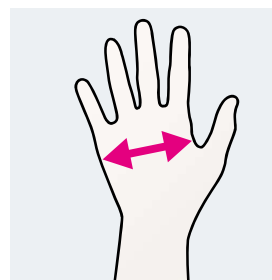

手掌中央部の幅を採寸してください。

# medi 弾性スリーブを購入したいと思ったら

## ◆製品代金以外の必要料金

製品代金のほか、別途①～③をご負担いただきます。

①消費税（税込み価格は消費税込みの価格を表示）

②1回のご注文における定価合計金額が11,000円（税込）未満の場合は別途送料がかかります。（以下、それぞれ税込金額）

本州・四国：825円 / 北海道・九州：1,166円 / 沖縄・離島：1,474円

③振込の場合は、振込手数料

## ◆お支払い方法

銀行振込、コンビニ決済

・銀行振込は、下記口座までお願いします。

銀行名	支店
みずほ銀行	六本木支店 (053)

口座名義	種別	口座番号
メディ・ジャパン株式会社	普通	4569572

振込手数料はお客様負担となります。

・コンビニ決済は、ご注文後にご送付いたします所定の払込用紙をご利用ください。

・カード決済をご希望の方は、オンラインストアをご利用ください。

なお、一部の製品について、オンラインストアからご購入いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

## ◆お申込みの有効期限および支払時期

お申込み後、60日以内にお願いたします。お申込みから60日間入金がない場合、ご注文はキャンセルとさせていただきます。

## ◆返品・変更・キャンセル

製品発送後の返品・変更は、お客様に製品が到着した日から「30日以内かつ未使用」に限ります。

取り寄せ製品の返品・変更、製品が到着するまでのキャンセルはいずれもお受け致しかねます。

製品が不良品の場合は、返品・交換いたします。

## ◆返品・変更にかかる送料

不良品による場合、弊社が負担いたします。

お客様都合による場合、お客様のご負担となります。

## ◆お届け時期

入金確認後、すみやかに製品を発送いたします。

万一欠品の為、すみやかに製品を発送できない場合はご連絡差し上げます。

また、年末年始等、長期の休業日をはさむ場合は、多少納期が遅れる事がございます。

取り寄せ製品および欠品の製品は、お届けまで原則として約30日間かかります。

ただし、下記の場合について別途ご注意くださいようお願い申し上げます。

お届けまで約40日かかる取り寄せ製品

メディハーモニー ブラック色

メディエスプリ 全ての取り寄せ製品

以上の内容をご確認いただいたうえで、下記窓口までご注文をお願い申し上げます。



## メディ・ジャパン株式会社

[www.medi-japan.co.jp](http://www.medi-japan.co.jp)

カスタマーセンター（ご利用者様、医療従事者様向け窓口）

取り扱い業者様向け窓口（ご注文・在庫照会）

TEL : 0120-813-788

TEL : 03-5962-4306

受付時間

email : [customer-service@medi-japan.co.jp](mailto:customer-service@medi-japan.co.jp)

FAX : 050-3116-1829

9:00 ~ 16:00

FAX : 050-3116-3007

【オンラインストアからもご購入いただけます。】



※オンラインストアでは、クレジット決済が可能です。  
※一部の製品について、オンラインストアからご購入いただけない場合がございます。

<https://www.medi-japan.co.jp/shop>

新規の取引に関するご相談は、弊社営業までご連絡ください。

連絡先が不明の場合は、カスタマーセンターよりご案内いたします。

土日祝日はつながりません。  
また、年末年始に、休業日を設定いたします。

・弾性スリーブは医療機器です。必ず医師にご相談のうえ、ご購入ください。  
・着用にあたっては、製品に同梱される添付文書をよくお読みください。

